



medi

# medi SAS<sup>®</sup> multi

Schulterabduktionsschiene

Shoulder abduction splint

Orthèse d'abduction de l'épaule


Férula para abducción de hombro

Gebrauchsanweisung. Instructions for use. Mode d'emploi. Instrucciones de uso.  
Instruções para aplicação. Istruzioni per l'uso. Gebruiksaanwijzing. Brugsvejledning.  
Bruksanvisning. Návod k použití. Uputa za uporabu. Инструкция по использованию.  
Kullanma kılavuzu. Instrukcja zakładania. Οδηγία εφαρμογής. Használati útmutató.

medi. I feel better.



1

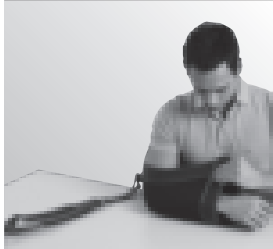


2




3



4

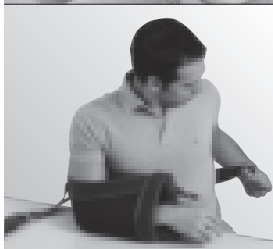

5

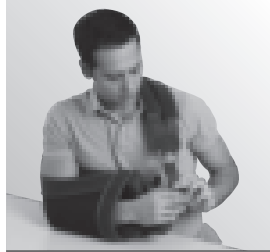

6



7



8



9

# medi SAS® multi

## Назначение

medi SAS multi представляет собой подушку для отведения плеча. Изделие необходимо применять исключительно для ортезного лечения плеча; оно предназначено только для использования при отсутствии повреждений на коже в качестве раневого покрытия.

## Показания

- Иммобилизация после имплантации протеза плечевого сустава
- Иммобилизация после реконструктивных операций на вращающей манжете плеча
- Иммобилизация после оперативного лечения переломов плечевой кости

## Противопоказания

До настоящего времени не выявлены. Проконсультируйтесь с Вашим врачом, при наличии у Вас следующих состояний:

- Заболевания или повреждения кожи в месте соприкосновения с шиной, особенно, если имеются признаки воспаления (отек, покраснение, повышение температуры)
- Беспричинные отеки мягких тканей
- Неврологические нарушения вследствие компрессионных синдромов.

Туго зафиксированная шина может вызывать локальные компрессионные симптомы.

## Рекомендации по надеванию

Ортез можно надевать и снимать в условиях операционной. Обратите внимание на следующие детали: Передняя застежка должна быть открытой. Плечевой ремень не зафиксирован.

1. Поместите прооперированную руку в поддерживающую повязку для предплечья. (Рис.1)
2. Застегните поддерживающую повязку для предплечья. (Рис.2) Используйте также прилагаемый ремень с липучкой для дополнительной фиксации. (рис. 3).
3. При наличии соответствующих показаний также поместите под ремень клин внешней ротации (рис. 4).  
При этом следует обязательно заблаговременно убедиться в том, что показание действительно допускает положение внешней ротации.
4. Оберните пояс вокруг талии и застегните его. (Рис.5)
5. Перекиньте плечевой ремень через здоровое плечо, придерживая застежку ( Рис.6). Закрепите поддерживающую повязку на подушке (Рис.7).
6. Зафиксируйте застежки. (Рис.8). С посторонней помощью легче надевать плечевой ремень. Помощник самостоятельно фиксирует плечевой ремень. Весь процесс выглядит так, словно он помогает Вам одеть пиджак. (Рис.6).

Применение данного ортеза должно осуществляться под контролем лечащего врача. Только в этом случае Вы можете быть уверены в эффективности лечения. Любые изменения схемы лечения данным ортезом должны обсуждаться с лечащим врачом

Если ночью у Вас появляется чувство,

что рука или плечо находится в опасном положении, Вы можете поместить под ортез подушку или сильнее затянуть ремень вокруг таза.

---

#### **Рекомендации по уходу и хранению**

Не носить изделие в воде. Остатки мыла могут вызвать раздражение кожи и способствовать износу материала.

- Стирайте наволочки, карманы и ремни предпочтительно с использованием моющего средства medi clean вручную или в щадящем режиме стирки при температуре 30°C с мягким моющим средством без использования ополаскивателя.
- Не отбеливать.
- Сушите на воздухе.
- Не гладьте.
- Не подвергать химической чистке.



---

#### **Инструкция по хранению**

Хранить в сухом месте, защищать от прямого попадания солнечных лучей.

#### **Материалы**

полиуретан, полиамид.

#### **Гарантия**

в объемах, предусмотренных законодательством, действующим на территории страны-импортера.

#### **Утилизация**

Изделие можно утилизировать вместе с бытовыми отходами.

#### **Ваша компания medi**

желает Вам скорейшего выздоровления!