

# medi ROM / medi ROM cool

Universalknieschiene  
 Universal Knee Brace  
 Orthèse pour le genou  
 Órtesis de rodilla

Gebrauchsanweisung. Instructions for use. Mode d'emploi. Instrucciones de uso. Instruções para aplicação. Istruzioni per l'uso. Gebruiksaanwijzing. Brugsvejledning. Bruksanvisning. Návod k použití. Uputa za uporabu. Інструкція по використанню. Kullanna kilavuzu. Instrukcja zakładania. Οδηγία εφαρμογής. Használati útmutató. Інструкція з використання.



1




2



3



4

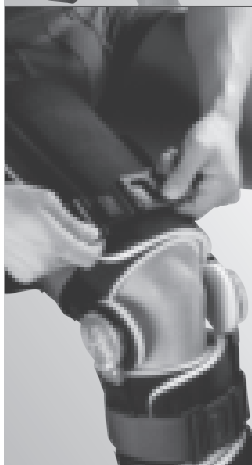

5



6

# medi ROM / medi ROM cool

## Назначение

Универсальный ортез для коленного сустава medi ROM может быть использован только в случае отсутствия заболеваний и повреждений кожи непосредственно в области применения ортеза в качестве раневого покрытия.

## Показания

- Состояние после операции на коленном суставе
- Иммобилизация после повреждений коленного сустава и в период реабилитации
- Надежная стабилизация коллатеральных связок после травмы или операции

## Противопоказания

До настоящего времени не выявлены.

## Установка диапазонов сгибания/ разгибания

Для того чтобы задать диапазон движения, расположите прорезь в пластиковой крышке шарнирного механизма напротив красной кнопки – ограничителя разгибания. Нажмите на красную кнопку и, удерживая ее, установите требуемый угол разгибания. Отпустите кнопку. Повторите этот процесс для установки угла сгибания. Ограничение углов разгибания:

0°, 10°, 20°, 30°

Ограничение углов сгибания:

0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°

Углы ограничения движения для внутреннего и наружного шарнирных механизмов должны быть одинаковыми.

## Рекомендации по применению

- Расстегните все ремни и отсоедините шины с шарнирными механизмами от мягких подкладок.
- Туго оберните подкладки для бедра и голени вокруг ноги и зафиксируйте застежками-липучками спереди.
- Сначала прикрепите наружную шину с шарнирным механизмом на подкладку. Убедитесь, что шарнирный механизм находится на уровне надколенника и боковой оси коленного сустава.
- Таким же образом прикрепите внутренний шарнирный механизм. Проверьте, чтобы оба шарнирных механизма располагались на одном уровне.
- Вначале застегните верхний ремень на голени, затем – нижний ремень на бедре. Теперь застегните другие ремни, начиная снизу и продвигаясь вверх.
- Для снятия изделия расстегните ремни и подкладки и потяните ортез назад.

## Важные замечания

Корректируйте диапазоны сгибания и разгибания только по предписанию Вашего врача.

## Рекомендации по уходу

Перед стиркой застегните застежки-липучки. Остатки мыла могут вызвать раздражение кожи и способствовать износу материала.

- Стирайте мягкую подкладку и покрытие предпочтительно с использованием моющего средства medi clean.
- Не отбеливать.
- Сушите на воздухе.
- Не гладьте.
- Не подвергать химической чистке.



### **Инструкция по хранению**

Хранить в сухом месте, защищать от прямого попадания солнечных лучей.

### **Материалы**

алюминий, пенополиуретан, хлопок

### **Гарантия**

в объемах, предусмотренных законодательством, действующим на территории страны-импортера.

### **Утилизация**

Изделие можно утилизировать вместе с бытовыми отходами.

### **Ваша компания medi**

желает Вам скорейшего выздоровления!